

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ	C MODE	P MODE	ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ	ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΓΚΩΝΑΣ	3HZ/20MJ	10HZ/50MJ	2500	5-10	5-7 ΜΕΡΕΣ
ΧΕΡΙ/ΚΑΡΠΟΣ	1HZ/25MJ	8HZ/50MJ	2500	5-10	5-7 ΜΕΡΕΣ
ΗΒΙΚΗ ΣΥΜΦΥΣΗ	1HZ/25MJ	13HZ/60MJ	2500	5-10	5-7 ΜΕΡΕΣ
ΓΟΝΑΤΟ	3HZ/25MJ	10HZ/50MJ	2500	5-10	5-7 ΜΕΡΕΣ
ΠΟΔΙ/ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ	3HZ/20MJ	10HZ/50MJ	2500	5-10	5-7 ΜΕΡΕΣ
ΩΜΟΣ	8HZ/90MJ	12HZ/160MJ	2500	5-10	5-7 ΜΕΡΕΣ
ΟΣΦΥΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	8HZ/90MJ	10HZ/130MJ	2500	5-10	5-7 ΜΕΡΕΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ	10HZ/100MJ	15HZ/130MJ	2500	5-10	5-7 ΜΕΡΕΣ
ΓΟΦΟΣ	8HZ/100MJ	13HZ/160MJ	2500	5-10	5-7 ΜΕΡΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ	3HZ/5MJ	10HZ/15MJ	1500	2-3	2 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μετά από 20.000 χτυπήματα, σταματήστε να δουλεύετε για 5 λεπτά, ή όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 80 βαθμούς κελσίου, σταματήστε να δουλεύετε για 30 λεπτά.
- Για να αποφύγετε συσσώρευση θερμότητας, είναι σημαντικό να σιγουρευτείτε ότι οι αεραγωγοί πάνω και κάτω από την συσκευή δεν είναι μπλοκαρισμένοι
- Οι κεφαλές και οι ράβδοι είναι αναλώσιμα, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται μετά από συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας.